

アシベルト・プラス

ASHIBELT・PLUS

【警告】

1. 心臓ペースメーカーなどの体内植込み型医用電子機器を装着している方は、使用しないでください。【誤作動を招くおそれがあります。】
2. 脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント（頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長期間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療器具）などの磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は、使用しないでください。【誤作動を招くおそれがあります。】

【禁忌・禁止】

1. 小児（6歳以下）には使用しないでください。【いたずらなどで思わぬけがをするおそれがあります。】
2. 他の治療器との併用はしないでください。

【形状・構造及び原理等】

- (1) 構成
本 体：ベルト、磁石
- (2) 動作原理
永久磁石の磁力によって患部を治療する。
- (3) 写真（右足用、実製品は写真と形状、色が異なることがあります。）



【使用目的、効能又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。

【品目仕様等】

磁束密度：110mT

【操作方法又は使用方法等】

1. 靴下の上から磁石が足裏に当たるように足に装着する。詳しい装着方法は包装ケースを参照してください。
2. 体質や症状によって効果は一様ではありません。2～3日で効果があらわれない場合でも続けてご使用ください。

【使用上の注意】

1. 使用注意

次の人は、使用前に医師とご相談の上ご使用ください。

- 1) 悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- 2) 心臓に障害のある人。
- 3) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 4) 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人。
- 5) 皮膚に感染症及び／又は創傷のある人。
- 6) 安静を必要とする人。
- 7) 体温38℃以上（有熱期）の人。
例1) 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
例2) 衰弱しているとき。
- 8) ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の人。

2. 重要な基本的注意

- 1) 使用しても効果があらわれない場合には、医師又は専門家にご相談ください。
- 2) 使用中異常を感じられた場合は、すぐに使用を中止し、医師又は専門家にご相談ください。
- 3) 児童（7歳以上12歳まで）及び監督を必要とする方は、保護者の指導のもとで使用してください。
- 4) サウナなど高温の場所やスキー場など極寒地で使用しないでください。
- 5) 操作方法又は使用方法等以外の用途で使用しないでください。

使用前の注意

- 1) 鋭い角、変形などが認められましたら、使用しないでください。
- 2) しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
- 3) 縫製の破れがないかを確認し、破れが認められましたら、使用しないでください。

使用中の注意

- 1) 機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
- 2) 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- 3) 装着部に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
- 4) 磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける人は、検査の前に機器を取り外してください。

【貯蔵・保管方法等】

保管につきましては、直射日光を避けて、小児の手の届かない所に保管してください。

【取扱い上の注意】

1. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
2. 改造はしないでください。
3. 機器、包装箱などを廃棄する場合は、地域で定める条例に従って廃棄してください。
4. 次の場合は使用しないでください。腐食や変色の原因になります。
 - 1) 海水につかる場合
 - 2) 風呂、温泉に入浴する場合
5. 本品を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。切れる原因になります。
6. 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売元又は製造販売元に連絡してください。

【包装】

1組/ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：有限会社 森口合成
住 所：〒594-0006 大阪府和泉市尾井町2丁目9番7号
電 話：0725-41-2467
(土、日、祝日を除く 11:00-17:00)
製 造 元：有限会社 森口合成
販 売 元：有限会社 天正堂
住 所：〒930-0803 富山県富山市下新本町6-15